



RYCHLÝ NÁVOD JAK HIP'SAFE POUŽÍVAT?

WWW.HELITE.CZ

**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI HIP´SAFE K
VAŠÍ OCHRANĚ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ.
ZDE NAJDETE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ
INFORMACE K POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ.**



POPIS PRODUKTU

HIP´SAFE JE PŘIPRAVEN K POUŽITÍ

	<p>Opasek: Hip´Safe</p>
	<p>Spona: k rozepnutí a zapnutí opasku. Zelená LED dioda se automaticky objeví jakmile je spona zapnutá.</p>
	<p>Obal: k ochraně systému. Je lehký, pohodlný a omyvatelný.</p>
	<p>Nabíječka: k dobití baterie opasku.</p>
	<p>Bombička: k spuštění airbagů v případě pádu. Pouze na jedno použití. Musí být nahrazena po každém pádu.</p>

JAK AKTIVOVAT HIP´SAFE?

1 Zapnout sponu



Zelená LED dioda a zvuk pípnutí indikuje, že je systém aktivní.

Nastavte opasek nad boky a zapněte opasek, to aktivuje systém.

2 Zkontrolovat postavení opasku



Symbol šipky «UP» by měl směřovat nahoru.

3 Umístit opasek



Otočte opasek dozadu a tak aby byl ve středu. (spona vzadu/ šipka vpředu a ve středu)

4 Odepnutí opasku



Odepněte sponu a sundejte opasek.



VAROVÁNÍ: ŠPATNÉ POSTAVENÍ

Opasek nefunguje v následujících pozicích



Opasek není ve středu.



Opasek není dozadu otočen. (Spona by měla být vzadu)



Opasek je na špatné straně. (Šipka by měla ukazovat směrem nahoru)



DŮLEŽITÉ:

Nikdy nezapínejte opasek pokud ho nemáte oblečený na sobě.

(Riskujete neočekávané spuštění)

JAK NASTAVIT OPASEK?

1 Odstraňte obal



Kompletně odstraňte obal.

2 Nastavte pásek



Umístěte pásek na žádané místo k rozšíření či zmenšení velikosti.



K nastavení zatáhněte pásek.

! Nastavovací systém je umístěn na zadní straně opasku.

3 Vraťte obal na své místo



Umístěte obal přes opasek. Zkontrolujte, že symboly «UP» se shodují: žlutá na žlutou // červená na červenou.



Zapněte obal od jeho středu.

JAK HIP´SAFE DOBÍT?

Nabíječka je součástí balení.

Nizký stav baterie: během normálního používání opasku, červená kontrolka a zvuk «píp píp píp» indikuje, že je potřeba baterii dobít.



1 Připojte



Připojte nabíječku do spony opasku.



2 Odpojte



Zelená kontrolka indikuje, že je opasek dobyt a je opět připraven k použití.



DŮLEŽITÉ:
Po dobu nabíjení nikdy
sponu nezapínejte

JAK PO PÁDU ZNOVU AKTIVOVAT HIP´SAFE ?

1 Rozepněte opasek



Obal zcela odstraňte.



Otevřete kapsu.

2 Odstraňte prázdnou bombičku



Rozpojte bombičku.



Odšroubujte bombičku.



Odtraňte bombičku.

3 Vyfoukněte airbag



Stlačte airbasy rukama pro úplné odstranění vzduchu.

4 Složte a uložte airbag



Dvěma rukama srolujte airbag, od horní části až dolů.



Důležité:

Srolování airbagu: modrá strana by měla být svinutá dovnitř a bílá strana ven.



SPRÁVNÉ SROLOVÁNÍ:
bílá strana ven



ŠPATNÉ SROLOVÁNÍ:
modrá strana je venku



5 Zapněte kapsu airbagu



Začněte z rohu a následujte okraj.




Opakujte operaci i na druhé straně.

6 Umístěte bombičku



Vezměte novou bombičku.

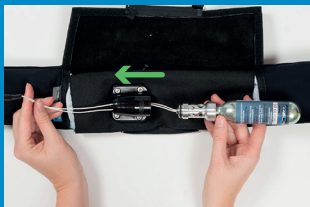

Protáhněte kabel skrz černý váleček.



Zašroubujte novou bombičku do černého válečku.




DŮLEŽITÉ:


Bombička musí být zcela zašroubovaná, nikdy nepřipojíte bombičku před jejím kompletním zašroubováním do černého válečku.



ANO

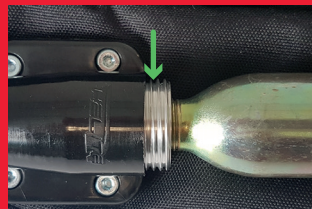

NE

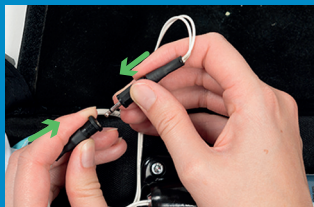

Připojte bombičku.

7 Zapněte opasek



Zavřete kapsu.



Vratte zpět na místo a zavřete obal.



**PRO VÍCE INFORMACÍ, SE PROSÍM
PORAĎTE S NAŠÍ UŽIVATELSKOU
PŘÍRUČKOU NA**

WWW.HELITE.CZ





KONTAKTUJTE NÁS



@HELITE.CZ.SK



INFO@HELITE.CZ



WWW.HELITE.CZ

BY

